

## *Brukerinformasjon spesialfottøy*

### •Hensikt:

Spesialfottøy er et hjelpemiddel som har til formål å beskytte, korrigere, avlaste og stabilisere foten.

### •Bruk:

Øk bruken etter hvert og vær oppmerksom på eventuelle trykkmerker. Hvis eventuelle trykkmerker/rødme ikke forsvinner kort tid etter bruk, må du kontakte ØSTO. Skoene skal alltid brukes med fotsengene som hører til.

### •Stell og vedlikehold:

Rengjør og puss fottøyet regelmessig. Dette forlenger levetiden.

Fornyelse:

Ved førstegangsbestilling kan man få inntil 4 par.

Ved senere fornyelse kan du få inntil 2 par i året.

Kontakt ØSTO ved behov for fornyelse.

### •Begrensninger og advarsler:

Kontroller dine føtter med henblikk på trykkmerker og sår. Dette er spesielt viktig, hvis du har nedsatt følelse.

Før du tar fottøyet på:

Kontroller at det ikke finnes noen fremmede gjenstander i skoene før du tar dem på. Ved fotforandringer er det risiko for at problemer og skader kan oppstå. Ta kontakt med ØSTO dersom du føler at fottøyet ikke lenger passer.