

Brukerinformasjon ortopedisk sydd fottøy

•Hensikt:

Ortopedisk fottøy/spesialfottøy er et individuelt tilpasset hjelpemiddel, som har til formål å beskytte, korrigere, avlaste og stabilisere foten.

•Bruk:

Øk bruken etter hvert og vær oppmerksom på eventuelle trykkmerker. Hvis eventuelle trykkmerker/rødme ikke forsvinner kort tid etter bruk, må du kontakte ØSTO. Skoene skal alltid brukes med fotsengene som hører til.

•Stell og vedlikehold:

Rengjør og puss fottøyet regelmessig. Dette forlenger levetiden.

Fornyelse:

Ved førstegangsbestilling kan man få inntil 4 par.

Ved senere fornyelse kan du få inntil 2 par i året.

Kontakt ØSTO ved behov for fornyelse.

•Begrensninger og advarsler:

Kontroller dine føtter med henblikk på trykkmerker og sår. Dette er spesielt viktig, hvis du har nedsatt følelse.

Før du tar fottøyet på:

Kontroller at det ikke finnes noen fremmede gjenstander i skoene før du tar dem på. Ved fotforandringer er det risiko for at problemer og skader kan oppstå. Ta kontakt med ØSTO dersom du føler at fottøyet ikke lenger passer eller har "mistet" sin funksjon.